

 **medela**[®]
NO.1 CHOICE OF HOSPITALS



Pump In Style[®] Advanced

NÁVOD K POUŽITÍ


Everything
mothers need

to pump, store
and cool
breastmilk



Pump In Style® Advanced

Mateřské mléko je ta nejlepší strava pro Vaše miminko. Odsávačka Pump In Style® Advanced Vám poskytne tu nejlepší podporu během celého období kojení. Moderní design odsávačky umístěné v praktickém batohu je vhodný pro aktivní a pracující maminky, které se rozhodly kojit tak dlouho, jak to bude možné.

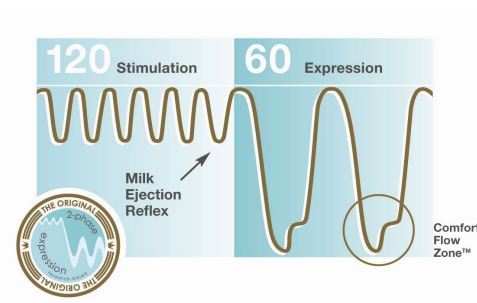

Elektrická dvoufázová odsávačka Pump In Style® Advanced byla navržena na principu dvoufázového odsávání mateřského mléka, které věrně napodobuje sací rytmus miminka. V první stimulační fázi odsávání dochází ke stimulaci tvorby mateřského mléka. Následná odsávací fáze napodobuje pomalejší hlubší sání, které maximalizuje průtok mléka v co nejkratším čase. Odsávání je tak jemné, přirozené a rychlé.

II Použití

- Umožňuje uchování mléka při odsávání v zaměstnání nebo když nemůžete být s dítětem.
- Uchovává tvorbu mléka, je-li kojení dočasně přerušeno.
- Uvolňuje nalitá prsa.
- Pro použití doma a na cestách.

III Důležitá bezpečnostní upozornění

*Během používání elektrického přístroje vždy dodržujte následující instrukce:
Před použitím čtěte všechny instrukce.*

- Ihned po ukončení používání odpojte přístroj ze zásuvky.
- Odpojení přístroje od elektrického vedení je možné pouze vytažením adaptéru odsávačky ze zásuvky.
- Nepoužívejte během koupání nebo sprchování.
- Nikdy nevkládejte motor do vody nebo do jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neuchovávejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Nikdy elektrický přístroj nepoužívejte v případě poškozeného kabelu nebo zástrčky, v případě špatné funkčnosti jednotky, kontaktu s vodou nebo poškození.
- Udržujte adaptér mimo rozehráté/horké povrchy.
- Ujistěte se, že napětí adaptéru je kompatibilní s napětím v síti.
- Vždy používejte pouze originální adaptér k odsávačce Pump In Style® Advanced.
- Nejprve zapojte adaptér do odsávačky Pump In Style® Advanced a až poté do zásuvky.
- Je-li přístroj zapojen do zásuvky, neměl by být ponechán bez dozoru.
- Zkontrolujte odsávací set, zda není opotřeben či poškozen.
- Používejte pouze originální příslušenství Medela.
- Přístroj používejte pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu.
- Při používání přístroje v blízkosti dětí je nutný dohled.
- V případě výskytu problémů nebo bolesti, kontaktujte laktačního odborníka nebo lékaře.
- Zařízení není vhodné pro použití za přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem, kyslíkem nebo s kyslíčným dusným.
- Přenosná a mobilní zařízení mohou ovlivnit funkčnost odsávačky.
- Odsávačka Pump In Style® Advanced vyžaduje speciální bezpečnostní opatření dle EMC (elektromagnetické kompatibility) a potřebuje být servisována dle EMC informací uvedených v tomto návodu.

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

IV Montáž



Bílou membránku připevněte na žlutý ventil tak, aby seděla těsně na ventilu.



Nasaďte ventil na prsní nástavec. Dodržte polohu uvedenou na obrázku.



Našroubujte láhev na prsní nástavec.



Transparentní konec hadičky vložte do otvoru k prsním nástavci.



Druhý konec hadičky vložte do zdířky umístěné v krytu motoru.



Jestliže odsáváte pouze z jednoho prsu, nevyužitou zdířku utěsněte (viz obrázek).

IV Montáž



Battery operation

Elektrický provoz

Konektor síťového adaptéru nebo kabel „BatteryPak“u zasuňte do zdířky motoru.

Síťový adaptér zastrčte do standardní elektrické zásuvky.



Provoz na baterie

Odstraňte bateriový kryt, správně vložte baterie (viz vnitřní část „Battery Pak“u). Pět baterií musí být umístěno na každé straně „Battery Pak“u. Nasaďte bateriový kryt.

„Battery Pak“ byl navržen pro bezpečné použití při umístění ve speciálním obalu. Speciální obal lze umístit do hlavní tašky nebo tašky motorové jednotky spolu s adaptérem.

„BatteryPak“ funguje s 10 AA alkalickými nebo nabíjecími bateriemi. Každá sada baterií umožňuje asi 3 hodiny odsávání. Doporučujeme výměnu nebo nabití baterií mezi 10. a 12. odsávací sekcí

V Odsávání

Pohodlně se usadte a uvolněte se. Během odsávání nebo kojení si podložte chodidla. Nadzvednutí chodil Váš sed uvede do správné polohy, čímž se sníží tlak na spodní stranu zad a hráz.



Prsní nástavce umístěte na prsy tak, aby byly bradavky ve středu nástavce.

- Během odsávání láhve nenaklánějte ani nepřeploňujte.
- Dbejte na to, aby se Vám během odsávání nezamotaly hadice.



Zapnutím odsávačky dojde k zahájení stimulační fáze. Nastavte rychlost stimulace otáčením regulátoru rychlosti ve směru hodinových ručiček tak, jak je Vám to pohodlné.



Stimulační fáze přejde automaticky po dvou minutách do fáze odsávání. Jestliže cítíte uvolnění mléko dříve než po dvou minutách, můžete fázi odsávání zahájit stlačením „let-down“ tlačítka (viz obrázek). Nastavte úroveň odsávání dle Vašeho pohodlí. Jakmile ukončíte odsávání, vypněte odsávačku, odpojte ji od napájení a odpojte také odsávací set. Uzavřete láhev a uschovejte ji na další použití.


Použitím stojánku předejdete převrácení odsávačky.

VI Ruční odsávání


Následujte kroky 1 – 3 na straně 4:



Nasadte gumové těsnění na píst. Strana s větším průměrem směř k držáku. Po montáži píst pevně držte a otočte pístem, abyste se ujistili, že těsnění sedí správně.

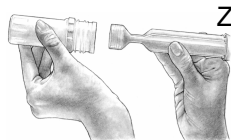

Zastrčte píst do cylindru.

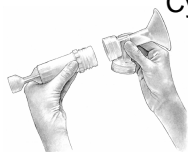

Cylindr našroubujte na prsní kryt tak, aby byl těsný.



Vakuum může být regulováno od MIN do MAX. Vždy začněte na IV a zvyšujte vakuum dle Vašeho pohodlí.

VII Odstranění a připevnění krytu motoru

V případě potřeby čištění, odstraňte kryt motoru. Detailní informace o údržbě odsávačky naleznete na straně 7.

Odstranění krytu motoru



- Odsávačku vypněte a odpojte od zdroje.
- Odstraňte hadičky (viz instrukce montáž).
- Sejměte kryt pomocí boční úchytky.

Připevnění krytu motoru

Nasadte zpět kryt motoru, dokud zcela nezaklapne.

Poznámka: Kryt musí na všech místech pevně a těsně sedět, jinak není zaručeno adekvátní vakuum a optimální výkon odsávačky.

VIII Čištění a hygiena

Důležité: Před čištěním a sterilizací všechny díly rozmontujte. Především odstraňte ventil z prsního nástavce a oddělte bílou membránu z ventilu.

Před prvním použitím a následně 1x denně: Rozmontujte, umyjte a opláchněte všechny části odsávací sady, které přišly do kontaktu s prsy a mlékem. Vložte díly do dostatečně velkého hrnce, naplňte jej studenou vodou tak, aby byly díly zcela pod vodou, zahřejte a nechte vařit po 3 minuty. Poté vodu vylijte, nechte díly vychladnou a osušte na čistém ručníku. Možnost čištění dílů v myčce na nádobí.

Po každém použití: Rozmontujte a omyjte všechny díly, které přišly do kontaktu s prsy nebo mlékem, v mýdlové vodě, opláchněte je ve studené čisté vodě a nechte je osušit na vzduchu na čistém ručníku. Nepoužité díly uschovejte. Po každém používání otřete batoh a přední desku vlhkým hadříkem.

Upozornění: Není doporučována sterilizace v mikrovlnné troubě. Možnost poškození dílů.

Sražené mléko v hadičkách: Nechte odsávačku běžet poté, co jste skončila odsávání, s připojenými hadičkami po dobu 1 až 2 minut nebo dokud nevyschnou. Opatrně zkontrolujte hadičky, zda jsou v nich ještě mléčné tečky. Jestliže se mléko dostane do hadiček, postupujte v čištění dle instrukcí „Před prvním použitím a následně 1x denně.“

Hygiena:

Dříve než se dotkneme prsů a lahví, omyjte si ruce mýdlem a vodou. Nedotýkejte se vnitřní strany lahví nebo víček. Prsa a okolí by měly být očištěny vlhkou tkaninou. Používání mýdla nebo alkoholu na pokožku kolem bradavek vysušuje pokožku a způsobuje rozpraskání bradavek.

IX. Skladování mateřského mléka

- Nenechávejte mléko v pokojové teplotě.
- **V chladničce:** Abyste zabránili množení bakterií, skladujte mléko, které ihned nespotebujete, v chladničce při cca. 4°C, nebo ho zmrazte skladujete-li jej na více než 24 hodin.
- **V mrazáku ledničky:** Mateřské mléko může být skladováno 6 měsíců při teplotě cca. -16°C.
- **Hluboké zmražení:** Mateřské mléko může být skladováno 12 měsíců při teplotě cca. -18°C.
- Při zmrazení mléka neplňte láhve do více než ¾ láhve, protože mléko zvětší svůj objem, nebo použijte Medela skladovací sáčky. Označte láhve a sáčky datem odsávání.
- **V chladícím zařízení Pump In Style® Advanced™**
Odsávačka Pump In Style® Advanced je vybavena speciálním chladícím zařízením. Po ukončení odsávání umístěte láhve s mlékem do přihrádky v chladícím zařízení. Mléko zůstane chladné, po návratu domů jej přemístěte do ledničky nebo mrazáku.

Rozmrazování mléka

- Mléko rozmrazíte umístěním láhve/ sáčku pod studenou nebo teplou vodu (37°C) nebo umístěním na 12 hodin do ledničky.
- Jemně mléko protřepete, aby došlo ke smíšení tuků.

Upozornění:

- Nikdy mléko nerozmrazujte v mikrovlnné troubě nebo v hrnci s vařící vodou.
- Rozmražené mléko znovu nezmrazujte.

X. Odstraňování závad

Jestliže je odsávání nedostatečné nebo žádné, ujistěte se:

1. prsní nástavce jsou těsně přiloženy k prsu.
2. odsávací set je řádně smontován (viz instrukce k montáži).
3. bílá membránka je nepoškozená, čistá a je správně přiložena na ventilu (viz instrukce k montáži).
4. kryt motoru správně těsní.
5. správné zapojení hadiček.
6. utěsnění druhého portu, odsáváte-li pouze z jednoho prsu.

Když dojde k přetečení mléka:

Jestliže se mléko dostane do hadiček nebo do přístroje:

1. Vypněte odsávačku a odpojte ji od zdroje výkonu.
2. Vyjměte přední desku.
3. Následujte instrukce pro čištění „Sražené mléko v hadičkách.“
4. Na otření přední desky a batohu použijte vlhkou (nikoli mokrou) tkaninu.
5. Jestliže jsou jednotlivé díly úplně suché, znovu smontujte odsávačku a příslušenství.

X. Záruka

Tento produkt je určen pouze pro jednoho uživatele. Používání více osobami může způsobit zdravotní rizika a zneplatňuje záruku.

Záruka 2 roky od data nákupu, mimo odsávací sadu, batoh a chladicí zařízení.

Výrobce nezodpovídá za poškození a následné poškození způsobené nesprávnou manipulací, nesprávným užitím nebo použitím neoprávněnými osobami.

X. Likvidace zařízení

Zařízení musí být ekologicky zlikvidováno dle místních předpisů o likvidaci o elektroodpadu. Nesprávná likvidace může mít negativní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví.

X. Seznam dílů

| | | |
|-----|---------------------------------------|----------|
| a. | Láhev na mléko (150 ml) | 811.7009 |
| b. | Chladicí zařízení | 800.0675 |
| c. | Přední deska motoru (EURO, UK,AUS/NZ) | 600.7084 |
| c2. | Přední deska motoru (US/JP) | 600.7083 |
| d1. | Pevný šroubovací uzávěr | 810.7057 |
| d2. | Šroubovací Uzávěr | 810.7062 |
| d3. | Víčko | 810.0473 |
| e1. | Battery Pak (EURO, UK,AUS/NZ) | 901.7006 |
| e2. | Battery Pak (US/JP) | 901.7004 |
| f1. | Síťový adaptér (EURO) | 920.7044 |
| f2. | Síťový adaptér (UK) | 920.7043 |
| f3. | Síťový adaptér (AUS/NZ) | 920.7042 |
| f4. | Síťový adaptér (US/JP) | 920.7041 |
| g. | Lactina píst/cylindr | 800.0652 |
| h. | Zástrčka portu. | 820.7042 |
| i. | Hadice | 800.0758 |
| j. | Stojánek láhve | 810.0462 |
| k. | Prsní nástavec | 810.0131 |
| l. | Ventil | 810.0475 |
| m. | Membránka bílá | 820.7013 |

X. Technické údaje

Vakuum: -50 mm Hg.....-250 mm Hg MAX

Napájení: 230/240 V, 50/60 Hz, 10 W příkon, 120 V, 60 Hz, 15 W příkon

9 V DC, 1 A výkon

Car adaptér 12 V DC, číslo zboží: 928.7001 (prodáváno samostatně).

10 x 1,5 V alkalická baterie AA nebo velikost LR6

nebo 10 x 1,2 V Ni Mh nebo Ni Cd znovunabíjecí baterie AA nebo velikost LR6

Rozměry: 395 x 280 x 165 cm, **Váha:** 4,1 kg

Teplota °C: Používání: +5/+40, skladování: +50/ -20

RH %: Používání: 80/ 20, Transport/ Skladování: 95/ 20

